

硝子体カッター

Disposable


ディスポ TDC 硝子体カッター 6000
6本入
認証番号：223AGBZX00086000

ゲージ	カタログ番号
27G (0.4mm)	AU-6268NMD04S
25G (0.5mm)	AU-6268NMD05S
23G (0.6mm)	AU-6268NMD06S

ディスポ 硝子体カッター 6000
6本入
認証番号：223AGBZX00086000

ゲージ	カタログ番号
27G (0.4mm)	AU-6267NMD04S
25G (0.5mm)	AU-6267NMD05S
23G (0.6mm)	AU-6267NMD06S
20G (0.9mm)	AU-6267NMD09S


■アダプタ

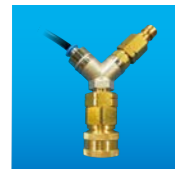

AU-1265USTA1
USTアダプタ ポシュロム用
(Snap tite)



AU-1265USTA2
USTアダプタ ポシュロム用
(Schröder Bellows)

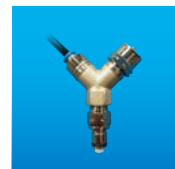

AU-1265USTA5
USTアダプタ ドルク用

■仕様

装置名	ウルトラスピードトランスフォーマー	
カタログ番号	AU-1265UST	
重量	6kg	
寸法	H139×W404×D218mm	
医療機器分類	クラスI機器、BF形装着部	
保護分類	IPX0	
入力	主電源	AC100V 50/60Hz
	ヒューズ	2個、100~240V~T800mAL/250V
	消費電力	50VA(最大)
	空圧入力	4.5~8バル/65~115psi(医療用ろ過空気)
空気消費量	流量 125ℓ/分	
硝子体切除 モジュール	空圧式 入力	最大 2,500カット/分、リニア
	出力	最大 6,000カット/分、リニア

日本販売代理店:

RE アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

本社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
TEL.(06)4794-8220(代) FAX.(06)4794-8222
東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
TEL.(03)5816-1480(代) FAX.(03)5816-1483
名古屋営業所：〒465-0092 愛知県名古屋市名東区社台2-128 パティナー社台
TEL.(052)760-3955(代) FAX.(052)760-3956
福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル
TEL.(092)437-5180(代) FAX.(092)437-5181

www.re-medical.co.jp

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

特約店



UltraSpeed Transformer

RE アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

既存の手術器械を 6000CPMにアップグレード!!

AU-1265UST
ウルトラスピードトランスフォーマー

UltraSpeed Transformer



※UST 本体にはアダプタが 1 個付きます

使いやすい 普及している硝子体手術器械に簡単に接続できます。

安全 高速カッターにより牽引を最小限に抑えます。

速い 高速カッターにより硝子体手術時間を短縮できます。


本体パネル (タッチパネル)

術中のさまざまな状況に対応できるよう
3つの動作モードを有しています。

Linear リニアモード

硝子体手術器械のカットレートに基づいて、2x~6xで作動するモードです。

※硝子体手術器械のカットレートは、できるだけ大きく設定し、USTの増倍率はできるだけ小さくしてください。

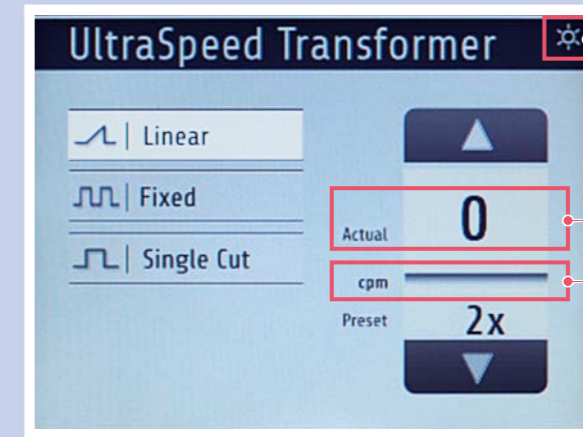


☀️をタッチすることにより、スクリーン輝度を変えることができます。

△▽をタッチすることにより、2x,3x,4x,5x,6xを選択できます。

実測値
(数値と黄色のバーで表示します)

Fixed 固定モード

フットスイッチを踏むと同時に、設定されたカットレートで作動するモードです。

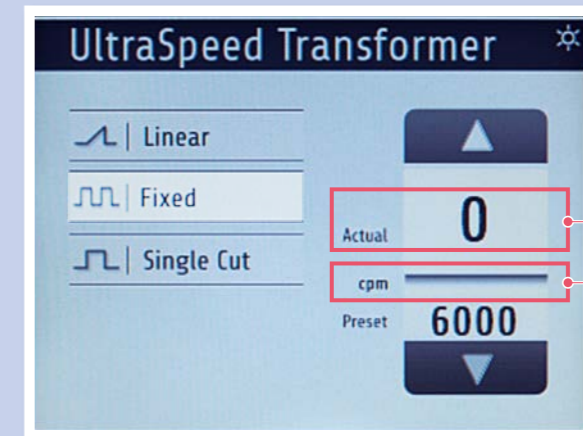


△▽をタッチすることにより、カットレートを100単位で最大6000CPMまで設定できます。

実測値
(数値と黄色のバーで表示します)

Single Cut シングルカットモード

フットスイッチを踏むたびに1回ずつカッターが動作するモードです。

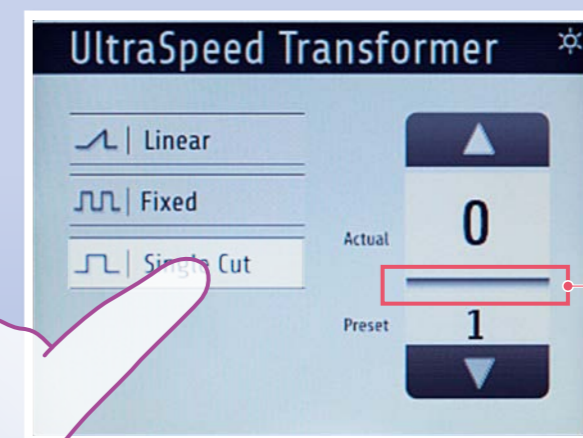

△▽は作動しません。

黄色のバーは表示されません。

画面のモードボタンにタッチしてモードを切り替えます。