


エステルマン検査(両眼検査)操作手順書

- 1) 検査を行う患者を登録、または呼び出しを行います。
- 2) “視野”を選択し、測定眼を”2×(両眼)”を選択します。
- 3) “マニュアル検査の開始”を選択します。




- 4) “マニュアル検査の開始”を選択すると、下記の検査メニューが表示され、ウインドウ下部の OK を選択します。

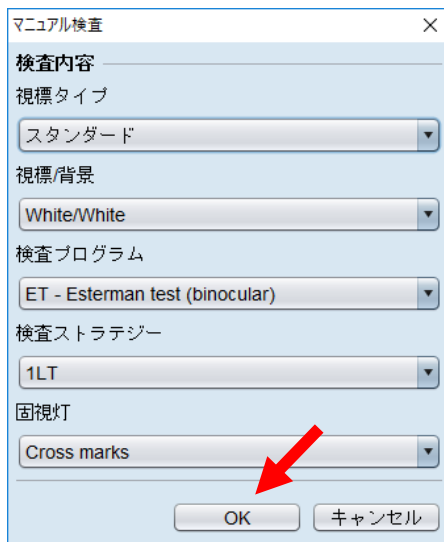

- 4) あご台を一番右側に移動させ、左側のあご台に患者様をセットし、Start ボタンを選択すると検査が開始されます。



【検査結果例】

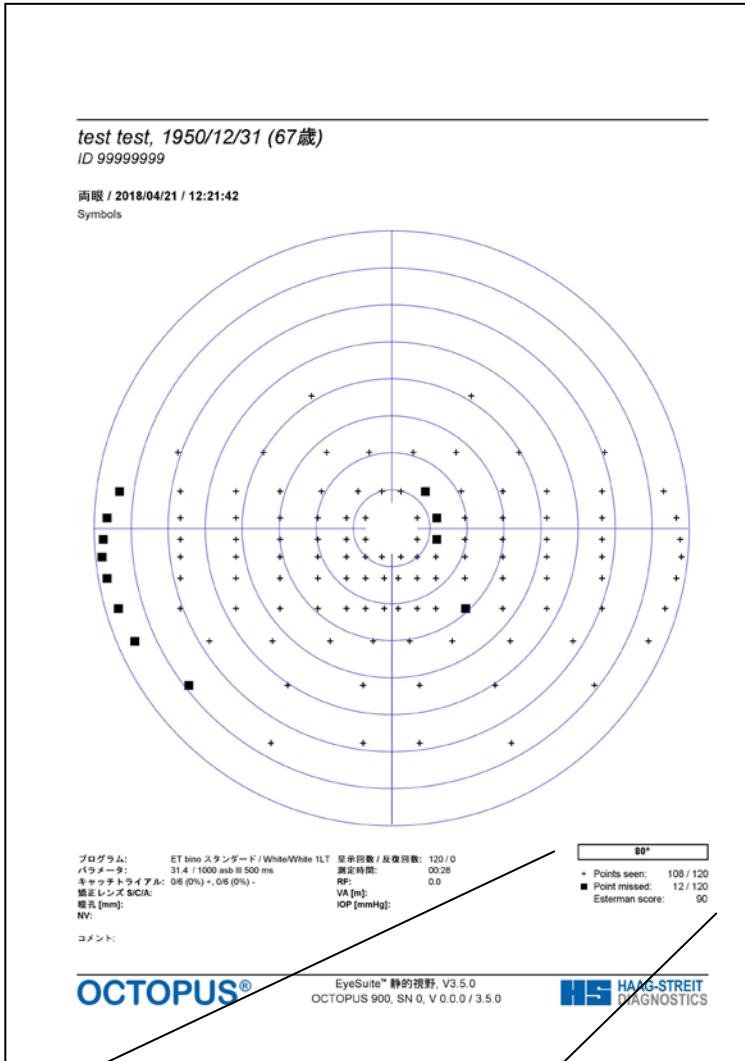

80°

+ Points seen: 108 / 120
 ■ Point missed: 12 / 120
 Esterman score: 90

+Points seen : 応答点の数
 ■Point missed : 応答しなかった数
 Esterman Score : エスターマンスコア
 ※エスターマンスコアは応答点の数ではありません。