



Applanation Tonometer

動物用電子眼圧計 トノペンAVIA

TONO-PEN AVIA VET

TONO-PEN AVIA VET

動物用電子眼圧計 トノペンAVIA

測定しやすい高感度・高精度センサー搭載！ キャリブレーション不要で操作が簡単！

動物用 トノペンAVIAは扱いやすい手持ち眼圧計です。眼圧測定値はゴールドマン眼圧計と高い相関を示しています。軽量で人間工学に基づくデザインを採用し、搭載する最新の電子測定技術により、迅速かつ正確な眼圧測定を行なうことができます。電源にはトノペンAVIA用長寿命バッテリーパックを内蔵し、2,500回以上の測定に対応します。トノペンXLと同様、オキュフィルム※(チップカバー)を装着することで、相互感染が防止できます。

※従来トノペンのオキュフィルム(チップカバー)がそのまま使用できます。



犬・猫にフレンドリー

動物用 トノペンAVIAは、検者間の測定誤差を最小限に抑えられるように設計されており、あらゆる犬・猫に対して最適な状況・環境で使用できます。操作ボタンを押すことで起動し、測定を行なうと、読み取りやすい両面の大型LCD画面に眼圧測定値が表示されます。迅速で無理のない測定の流れを実感してください。

多様な場面に対応

動物用 トノペンAVIAは、最新の人間工学に基づくデザインを採用しており、実際の診療における多様な場面で使用することができます。動物用 トノペンAVIAには両面にLCD画面が配置されており、右利きか左利きかを問わず、どちらのユーザーにも見やすい測定値の表示を可能にしています。オーバーモールドタイプのグリップ部のため、手の大きさに関わらず本体が手の中にしっかりと納まります。動物用 トノペンAVIAは、高い携帯性と握りやすさを備え、さまざまな場面で、場所を選ばず容易な眼圧測定を実現します。

インテリジェント — 再現性・信頼性

動物用 トノペンAVIAには、マイクロストレインゲージテクノロジーと1.0mm径のトランスデューサーチップが採用されています。この最新のマイクロプロセッサ技術により、検者のバイアスによる影響を受けにくく、客観的な眼圧測定値が得られます。また、6回の平均測定値と統計的信頼性指標により、再現性、信頼性の高い正確な眼圧測定結果を保証します。

信頼の圧平式眼圧計

動物用 トノペンAVIAでは、臨床的に信頼を得ている圧平式眼圧計 トノペンXLと同じように高精度な機能を装備するほか、より高感度のセンサーの採用、より優れた人間工学に基づくデザインの採用、4倍長持ちする長寿命バッテリーの搭載、LCD画面の大型化などの改良が施されています。また、日常的なキャリブレーションが不要となり、測定プロセスが簡略化されています。確かな信頼性を備えたライカート社の新しい圧平式眼圧計 動物用 トノペンAVIAにより、いつでもどこでも、どのような測定体位でも、確実な眼圧測定が可能になります。

■カタログ番号

AU-230650V-S	動物用トノペンAVIA(ケース、ジェットブロー※、オキュフィルム付)
※ジェットブローとは、トノペンAVIA先端の埃を除去する為のエアスプレーです。	
<別売品>	
AU-S-0336-D	ジェットブロー
AU-230651	オキュフィルム 150個/箱
AU-230577	バッテリーパック(トノペンAVIA用)

■仕様

寸法	160mm×44mm×20mm
重量	71g
トランスデューサー	マイクロストレインゲージ
測定範囲	範囲1~99 mmHg
電源	専用バッテリー(DC6V)

※仕様は予告なく変更されることがあります。

日本総代理店



アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

本社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名古屋営業所：〒465-0025 愛知県名古屋市中東区上社1-1204 ロール社東
福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

www.re-medical.co.jp