

2022年7月

お客様 各位

アールイーメディカル株式会社

添付文書改訂のお知らせ

謹啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、弊社が輸入販売しております、Reichert社製眼圧計「ライカート ORA G3」の添付文書を改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいます様お願い申し上げます。

新旧対照表

	旧	新	変更理由
警告	ノーズピース（エア吹き出し口）の開口部付近に指を入れないこと。	記載なし	警告欄から使用上の注意欄へ移動
使用上の注意	記載なし	6. ノーズピース（エア吹き出し口）の開口部付近に指を入れないこと。	警告欄からの移動
	記載なし	7. 本装置のクリーニングが終了した後に測定を実施すること。[被検者にノーズピースが接触する恐れがある]	患者様へのノーズピースの接触を防ぐため
	記載なし	8. 本装置の電源投入後、測定画面が表示されてから患者に額あてに額を付けるよう指示をすること。[被検者にノーズピースが接触する恐れがある]	患者様へのノーズピースの接触を防ぐため

改定後の添付文書は別添のとおりです（破線部改訂箇所）。

謹白