


下分氏 スパイラルCTRインジェクター

Shimowake Spiral CTR Injector

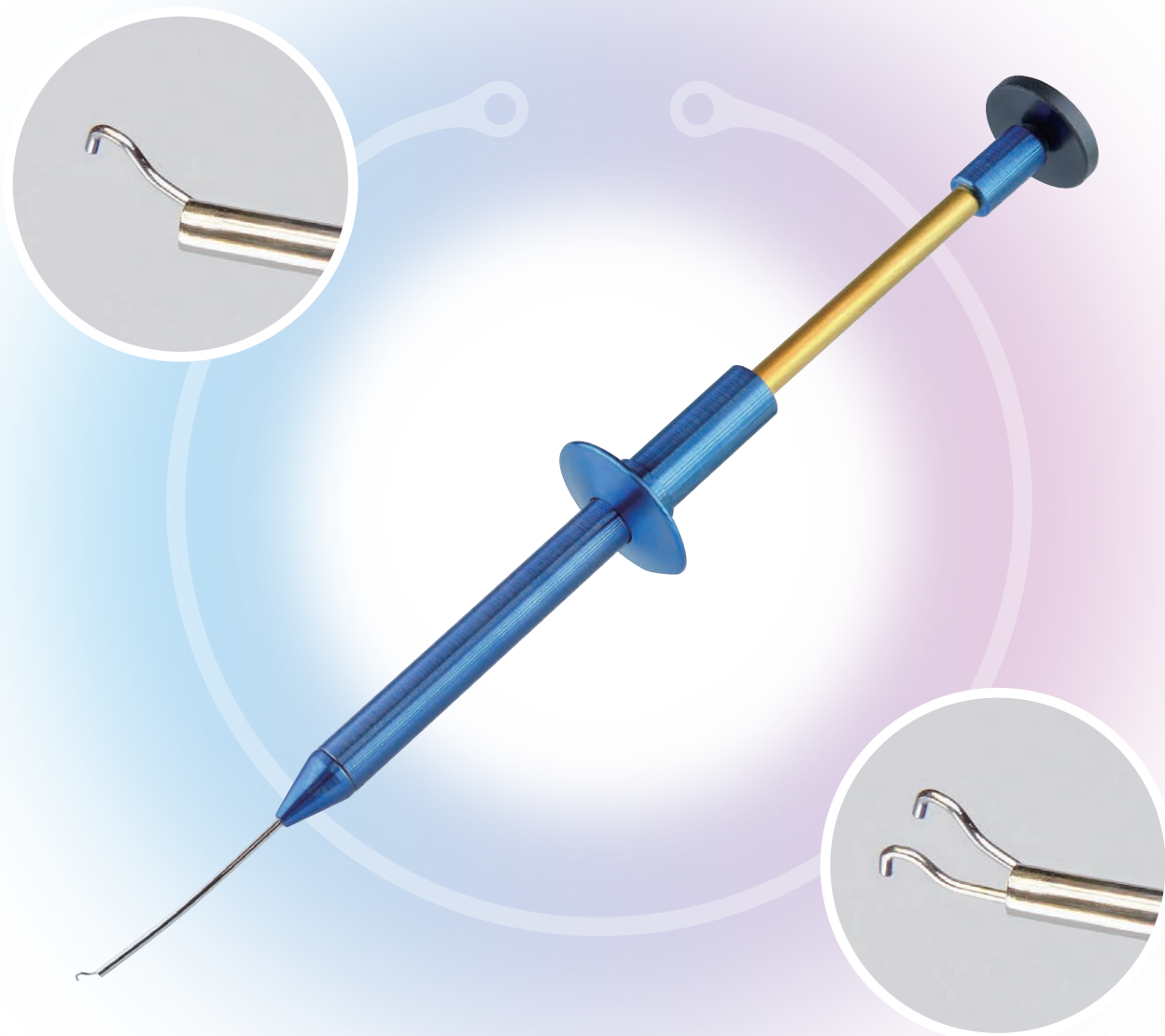

Shimowake Spiral CTR Injector



AE-4777 下分氏 スパイラルCTRインジェクター

- ① Spiral法でCTRを挿入する際に使用します。
- ② 先端の2つのフックにCTRのアイレットを差し込む設計で、CTR挿入時にチン小帯にかかる負担を最小限に抑えることができます。
- ③ 脆弱チン小帯眼の症例に対して特に有用です。

■ 施術手順




- 1** インジェクターを押し進めてインナーフックを出し、CTRのアイレット(穴)の片方を差し込みます。




- 2** CTRをシャフト内に半分ほど引き込んだところで、もう片方のアイレット(穴)をアウターフックに差し込みます。




- 3** CTRがシャフト内に入り込みましたら、準備が完了です。

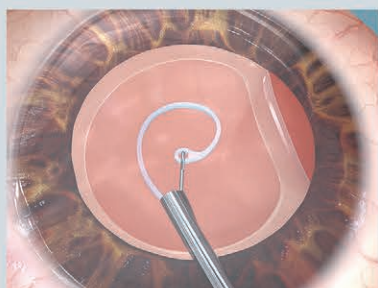

- 4** アウターフックの先端部分をCCCの中央部分に置き、ゆっくりとCTRを押し出します。

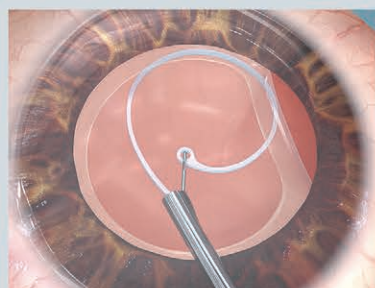

- 5** CTRが眼内でらせん状に広がることを確認します。

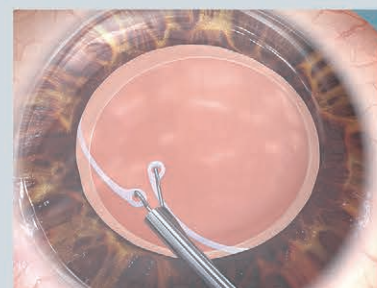

- 6** インジェクターを少し傾けるとCTRがフックから簡単に外れます。

※ASICO社はCORZA MEDICAL社の傘下となりました。

日本代理店

RE アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

本社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
名古屋営業所：〒465-0025 愛知県名古屋市中東区上社1-1204 ロール社東
福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

www.re-medical.co.jp

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。