



Keeler  
**Cryomatic MKII**  
眼科用冷凍手術装置 クライオマチック MKII

# The Cryomatic

## Perfection evolved

アモイルズクライオサージェリーユニットを皮切りに40年以上にわたり眼科用冷凍手術ユニットを提供してきたキーラー社より、定評ある高い信頼性はそのままに、さまざまな用途に合わせてより簡単に操作できる新しいクライオが登場しました。

## Console

使用するプローブに合った最適なパラメータを自動で設定するため、術中の煩雑なガス圧調整が不要になりました。

## Intuitive

3.5インチのバックライト付きデジタル表示パネルと内蔵スピーカーにより、凍結時間やガスボンベの残量、プローブの状態などを直感的に把握しやすい表示で確認できます。

## Probes



① 2509-P-8020	網膜剥離用プローブ 2.5mm スタンダード
② 2509-P-8021	網膜剥離用プローブ 2.5mm ロング
③ 2509-P-8024	白内障用プローブ 1.5mm 曲

※使用イメージ



# MK II

## プローブ接続口




ポンペをオープンにして電源を入れ、プローブを接続します。

## 表示パネル


### 1 パージ中

プローブを接続し、パージスタートボタンを押すとパージが自動的に始まり(パージ中は砂時計アイコンが表示されます)、約90秒で終了します。

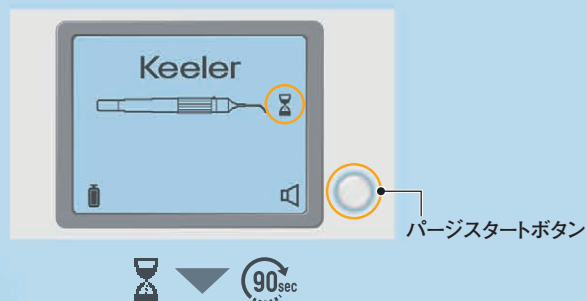


### 2 スタンバイ完了

タイマーとフットスイッチアイコンが表示されるとスタンバイ完了です。

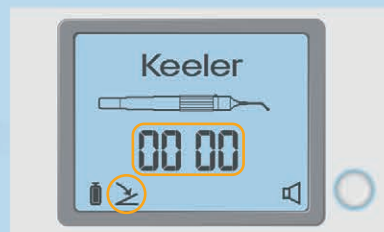

### 3 作動中

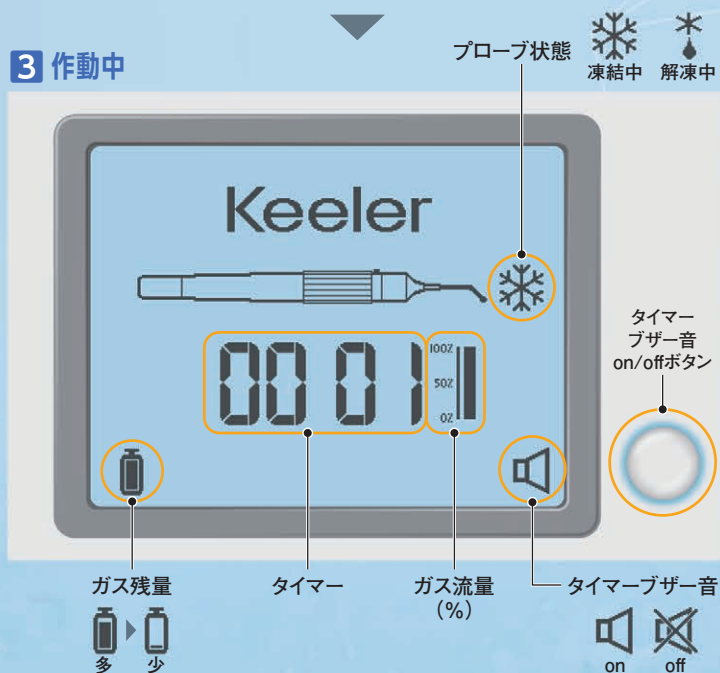

■ 2509-P-1010 クライオマチックMKII本体

商品内容	本体一式(電源コード、高圧ホース、フットスイッチ、排気ホース付)
本体寸法	350mm(幅)×200mm(奥行)×190mm(高さ)
本体質量	4.5kg
入力電圧	AC 100V (50/60Hz)
冷却用ガス	炭酸ガス(CO <sub>2</sub> )又は笑気ガス(N <sub>2</sub> O)非サイフォン式ボンベ使用
処置圧	各プローブに対して自動制御

※使用するガスの種類に応じたヨーク式アダプターが別途必要となります。

■ アダプター

2508-P-7015	CO <sub>2</sub> アダプター ヨーク式
2508-P-7017	N <sub>2</sub> Oアダプター ヨーク式

■ 付属品

2509-P-8011	高圧ホース(キラークライオ用)
2509-P-8013	フットスイッチ(キラークライオ用)
2509-P-8015	滅菌ケース(キラークライオ用)
AU-CART	フロアカート 10ℓボンベ2本設置型
AU-10CY	CO <sub>2</sub> ボンベ ヨークバルブ10ℓ
AU-10NY	N <sub>2</sub> Oボンベ ヨークバルブ10ℓ



AU-CART  
フロアカート

- 寸法：幅 400 × 高さ 950 × 奥行 550mm  
キャスター4輪自在(ストッパー2カ所付)
- 10ℓボンベ2本設置型

日本総代理店

**RE** **アールイーメディカル株式会社**  
R E MEDICAL, INC.

本社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29  
東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル  
名古屋営業所：〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-1204 ロール社東  
福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

[www.re-medical.co.jp](http://www.re-medical.co.jp)

TEL.06-4794-8220(代) FAX.06-4794-8222  
TEL.03-5816-1480(代) FAX.03-5816-1483  
TEL.052-760-3955(代) FAX.052-760-3956  
TEL.092-437-5180(代) FAX.092-437-5181