






AE-4777 下分氏 スパイラルCTRインジェクター CTRセッティング時のご注意

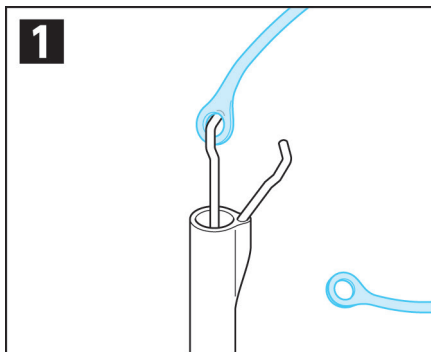

インジェクターを押してインナーフックを出し、CTRのアイレット(穴)の片方を差し込みます。

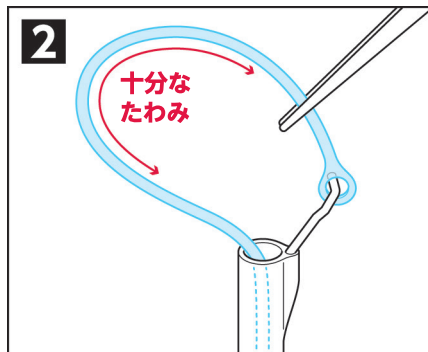

CTRをシャフト内に**1/3ほど引き込んだところで**、もう片方のアイレット(穴)をアウターフックに差し込みます。

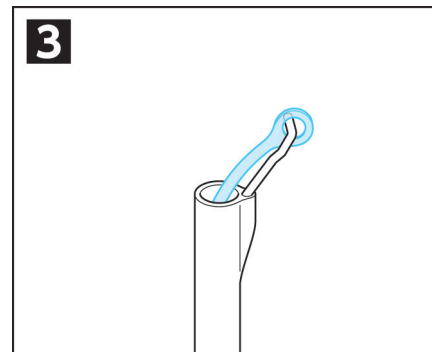

CTRがシャフト内に入り込みましたら、準備が完了です。

アウターフックへ差し込む際は、上記のようにCTRの長さには余裕を持たせた状態で行ってください。
十分なたわみがない状態でセットすると、CTRが破損する恐れがあります。

※アウターフックは非常に曲がりやすくなっていますので、洗浄の際などは十分にご注意下さい。



アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.