

BIOM® 4c/5c モーターユニットの交換方法（カタログ番号：54405）

△ モーターユニットおよびカップリングディスクの取り扱いに注意してください！

モーターユニットには磁気カップリングが含まれています。

交換手順

1. 交換前の準備

病院の衛生指針に従い、BIOM® 4c/5c を適切に準備してください。

2. 固定ネジの取り外し

モーターユニットを三角プレートに固定している六角穴付きボルト（2mm 六角レンチ使用）のみを取り外します。



3. モーターユニットの取り外し

ユニットを左右にわずかに動かしながら、ゆっくりと引き抜きます。

4. カップリングディスクの清掃（必要に応じて）

三角プレートに取り付けられたカップリングディスクを清掃してください。



△ 注意

- モーターユニットは BIOM® 4c/5c の交換部品 です。
- 安全に関する詳細な情報については、BIOM® 4c/5c の取扱説明書を参照してください。

新しいモーターユニットの取り付け

5. 新しいモーターユニットの設置

正しい向きを維持しながら、モーターユニットの四角いベースを三角プレートの長方形のくぼみに挿入します。

6. 固定ネジの取り付け


新品の六角穴付きボルト を使用してモーターユニットを固定します。

M2.5×4 のセルフロック式六角穴付きボルト (青いネジロック剤が塗布されたもの) を必ず使用してください。

7. 廃棄について

交換後のモーターユニットは、法的規定に従って適切に廃棄 してください。

病院の衛生および廃棄に関する指針を遵守してください。

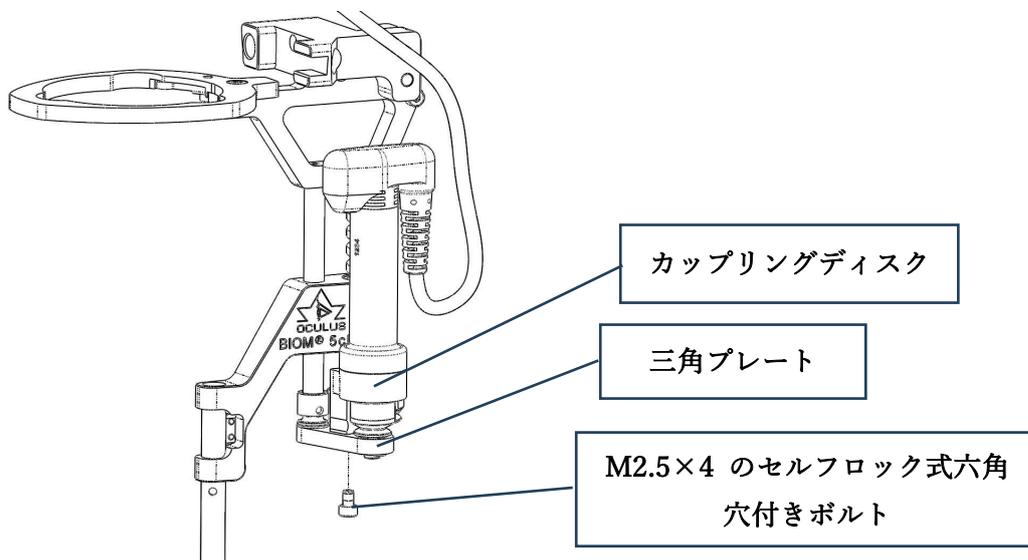

54405(BIOM用モーターユニット 5c) 構成内容

モーターユニット×1、2 mm六角レンチ×1、M2.5x4 セルフロック式六角穴付きボルト×1